

Tourni-KEY
إصدار



مجموعة وقف التزيف

يمكنك إنقاذ حياة

للاستخدام العام في حالة الطوارئ

citizen
AID



المحتويات:

قناع وجه X نظارات احاديه الاستعمال X زوجان من القفازات احاديه الاستعمال
قطعتين كبيرتين تضميد X مقص احادي الاستعمال للقطع X احادي الاستعمال
قلم حبر X قناع انعاش X عاصبه (تورنيكيت) X قطعه تقصميد منسوجه مثلثه X للجروح
citizenAID. لا يمكن مسحه

www.citizenAID.org

نزيف بسيط

نزيف بسيط

قم بالضغط المباشر أو إذا كان الجرح عميقًا، قم بتغطيته بيدك واضغط -

جرح سطحي



"غطي واضغط بقوة على الجرح"

جرح عميق



"املاً واضغط داخل الجرح - يمكنك استعمال أي طريقه تلائمك"

"تعبئة الجرح المؤقتة"



"تعبئة الجرح - استخدم المعدات، يمكنك استعمال أي طريقه تلائمك"

"إذا كان ذلك ممكنًا، قم برفع الجزء النازف ودعّمه أثناء ممارسة الضغط."

"ظمن المصاب"



"تذكّر، الاتصال بسيارة إسعاف"

"نزيف في الذراع/الساق"

" وإذا لم تنجح التعبئة والضغط - اربط العاصب (تورنيكيت)."

ذراع/ساق مشوهة أو مبتورة


اربط العاصب (تورنيكيت) (بسرعه -

نزيف شديد في الذراع/الساق

نزيف في الذراع/الساق لا يمكن إيقافه بالضغط المباشر. اربط العاصب (تورنيكيت) (بسرعه -

"تذكّر، من الممكن الاستعانة بالإبداع إذا لم يكن لديك معدات. استخدم حزام أو وشاح أو قطعة من الملابس لعمل عارض دم."

"ثني القماش الثلاثي "لف" (أو قطعة قماش أو حزام) حول الذراع/الساق المصابة وانقلب على الأطراف."

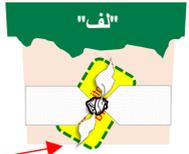

"انزل البطاقة المضادة للتجعيد من تحت، وامسك بالأطراف بإحكام للثبات."



"على اربط العاصب (تورنيكيت) شكل عقده بحكم."



حتى لف العاصب (تورنيكيت) يتوقف النزيف - قد تؤلم المصاب.

"تحت القماش ضع الخفاف الثلاثي لقلبه في مكانه. اكتب الوقت الذي تم فيه وضع العاصب الدم."



ذراع/ساق مشوهة أو مبتورة

اربط العاصب (تورنيكيت) (بسرعه -